



Alkoholfreies Schnell-Desinfektionspräparat auf Basis von quaternären Ammoniumverbindungen.

mikroqid[®] sensitive liquid

Unser Plus

- alkoholfrei
- schnelle und gute Wirksamkeit
- für alkoholempfindliche Flächen

Anwendungsgebiete

Zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen. Durch die gute Materialverträglichkeit ist dieses Produkt besonders für alkoholempfindliche Oberflächen geeignet (wie z. B. Acrylglas und Ultraschallköpfe).

Anwendungshinweise

mikroqid[®] sensitive liquid ist eine gebrauchsfertige Lösung. Diese unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Ggf. überschüssige Präparatemengen mit ungefärbtem Einmaltuch entfernen.

Die gebrauchsfertige Lösung können Sie wahlweise als Sprühdesinfektion oder als Schaum ausbringen. Bitte beachten Sie hierzu unsere Angaben zum Zubehör auf der Rückseite.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid	gebrauchsfertig	1 Min.
levurozid	gebrauchsfertig	1 Min.
begrenzt viruzid	gebrauchsfertig	1 Min.
BVDV	gebrauchsfertig	1 Min.
Vaccinia Virus	gebrauchsfertig	1 Min.
Norovirus	gebrauchsfertig	15 Min.
Polyoma SV40	gebrauchsfertig	1 Min.

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
Rotavirus	gebrauchsfertig	1 Min.

Listungen

- IHO-Liste
- ÖGHMP-Zertifikat
- VAH-Zertifikat



CE 0297



mikrozid[®] sensitive liquid

Produktdaten

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 0,26 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride;
0,26 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,26 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-14-Alkyl[(ethylphenyl methyl)dimethyl-, Chloride

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Form	flüssig
pH	6 - 8 / 20 °C
Viskosität, dynamisch	nicht bestimmt

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:
Customer Sales Service
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Das Tragen von Schutzhandschuhen (z. B. aus Nitrilkautschuk) wird empfohlen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mikrozid sensitive liquid 500 ml FL	20/Karton	70002832
mikrozid sensitive liquid 1 l FL	10/Karton	165715
mikrozid sensitive liquid 5 l KA	1/Kanister	109193

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Bettgestellhalterung gebogen 1l	134415
Bettgestellhalterung gerade 1l	134413
FOAM Schaumsprühpumpe DIN 32	180123
Sprühpumpe für 500 ml/1 l	180124
Wandhalterung Kunststoff 1l	134416

Verwandte Produkte

- acryl-des[®]
- acryl-des[®] Tücher
- mikrozid[®] sensitive wipes
- schülke wipes
- schülke wipes safe&easy

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellerlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com